

► EN Pump Set | ES Set de extracción | PT Kit de extração | EL Σετ άντλησης | HE ערכת שאיבה HE

Before using for the first time | Antes del primer uso | Antes da primeira utilização |

Πριν από την πρώτη χρήση | לפני השימוש הראשון |

1 | Check all parts for damage

| Compruebe todos los componentes para detectar desperfectos

| Verifique todas as peças quanto a danos

| Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές

| הרתיחי במשך 5 דקות לפחות



1


2 | Wash parts thoroughly

| Lave exhaustivamente los componentes

| Lave muito bem as peças

| Πλύντε τα εξαρτήματα σχολαστικά

| שטפי את החלקים היטב

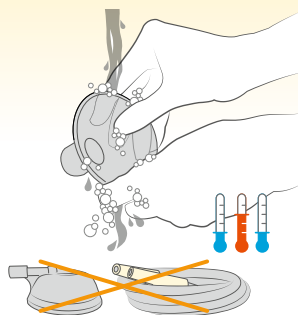

2


3 | Boil at least for 5 minutes

| Deje hervir durante un mínimo de 5 minutos


| Ferva durante pelo menos 5 minutos

| Αφήστε τα σε νερό που βράζει για 5 λεπτά τουλάχιστον

| בדקי את כל החלקים לאיתור פגמים

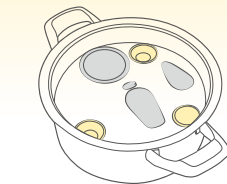

3

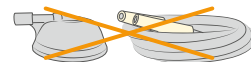


Please refer to instructions for use for more detailed information | Si desea obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones | Consulte as instruções de utilização para obter informações mais detalhadas | Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης | למידע מפורט יותר, אנא עיני בהוראות השימוש

PersonalFit™ PLUS



► **EN** Breast shield | **ES** Embudo | **PT** Funil | **EL** Χοάνη | **HE** מדגן

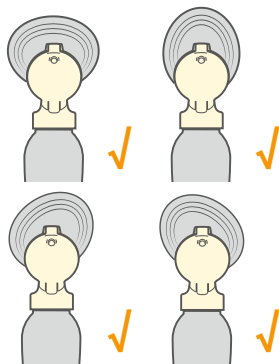

! The PersonalFit PLUS breast shield is oval and can be rotated (360°) and placed in the desired position which is most comfortable for you.

! El embudo PersonalFit PLUS es ovalado y se puede girar (360°) y colocar en la posición deseada que le resulte más cómoda.

! O funil PersonalFit PLUS é oval e pode ser rodado (360°) e colocado na posição desejada que seja mais confortável para si.

! Η χοάνη PersonalFit PLUS είναι οβάλ σχήματος και μπορεί να περιστραφεί (κατά 360°) και να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση που σας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση.

! מדגן PersonalFit PLUS הוא סגלגל וניתן לסובבו (360°) ולהניחו במיקום הרצוי והנוח ביותר עבורך.

► **EN** Storage of breast milk
ES Almacenamiento de leche materna
PT Armazenamento do leite materno
EL Φύλαξη μητρικού γάλακτος
 מאכלן יוסחא HE

	16–26°C 60–78°F		≤ 4°C ≤ 39°F		-18 – -20°C 0 – -4°F
	≤ 6 h		≤ 5 d		≤ 180 d (-18°C/ 0°F) ≤ 365 d (-20°C/-4°F)
	≤ 4 h		≤ 4 d		≤ 90 d